

手軽で簡単！  
靴下・ズボンに！

# 一人ではける!! 更衣ベルト

安心の  
日本製

- クリップを取り付けるだけで簡単に靴下・ズボンを履くことができます
- 一人で履くのが不自由な方、股関節や腰が不自由な方、ひざの曲げ伸ばしが不自由な方、妊婦の方などに!!

増原クリニック 看護師考案



更衣ベルト  
【素材】紐:ナイロン  
クリップ等:ステンレス  
【カラー】紺色



## クリップの開け方

クリップの円盤とワイヤーを持ち左右に引っ張ります。

## 使用方法

履き方の詳細は動画をご確認ください  
YouTube から「更衣ベルト」で検索!!

簡単3ステップ!!

### 靴下の場合




- ①くつ下の足首部分にクリップを2か所留め、くつ下につま先を入れます。
- ②両手で紐を引っ張り完全に靴下が履けるまで引っ張ります

### 外し方



- ③ワイヤーの先の輪っかに指を入れ引っ張ります。くつ下からクリップが自動で外れます。装着完了!

### 靴下

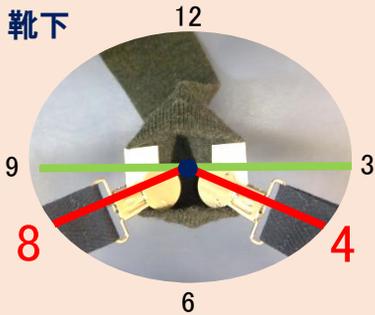

上手に履くポイント!

- ① クリップを留める位置は真横より少し下側 時計の4時と8時の位置
- ② クリップの奥まで靴下のくちを入れる

## どの種類の靴下でも履くことができます

### ズボンの場合



- ①ズボンのウエスト両側にクリップを2か所留めます
- ②両脚を入れ、両手で紐を引っ張り、ズボンが手が届くまで引っ張り上げます。
- ③引っ張り上げたら、ワイヤーの先の輪っかに指を入れ引っ張りクリップを外します。その後、完全にズボンを履きます。装着完了!

※強く引っ張り過ぎるとクリップの跡が残る場合があります。